

前 言

首先，非常感謝您選擇 DT - 100 型 印模材自動攪拌機。

為協助您順利使用本產品，請詳細閱讀使用手冊，並妥善保留。

本公司有權做產品功能提升或改變，使用手冊內容變更時，將不另行通知。

目 錄

注意事項 注意 !.....	1
重要安全指示 警告 !.....	1
附屬配件	2
使用前的準備	2
操作面板功能說明及設定方法	3
使用方法	4
設備規格	5
保證書.....	6

注意事項 注意！

1. 請勿自行維修本產品，因為打開或移除機殼時，會讓您曝露在危險的電壓或其他風險中。應由專業或經許可的維修人員進行維修工作。
2. 不可使用非本公司原廠生產的零組件，進行設備改造或維修。
3. 本產品僅可使用產品設備標籤上，所載明的額定電壓。

重要安全指示 警告！


1. 本設備採用分離式插頭隔離主電源，注意設備的移動，防止電源線掉落，造成人員傷亡事故。
 2. 勿靠近水邊使用本產品。並確實做好設備接地工作
 3. 勿將本產品放置在不穩固的平台、支架或桌面上使用。本產品可能因掉落而導致嚴重受損或人員受傷。
- ※ 若非遵照上述 "注意" 及 "警告" 內容進行使用本產品，而導致本公司產品受損或發生人身事故時，本公司概不負任何責任。
- 其中也包含任何，不可抗拒的因素如:水災、火災、雷擊或地震等。

附屬配件


品 名	數 量	材 質
攪 拌 碗	4	PP
附吸鐵置物盒	1	PP
調 拌 刀	1	PP
調 拌 棒	1	PP
水 量 杯	1	PP
水 罐	1	PP+PE

使用前的準備

1. 取下固定於機器底部的兩只手旋式馬達固定螺絲。(圖示一)
同時將取下的馬達固定螺絲，固定在(圖示二)位置。
2. 確認產品設備標籤(圖示二)上所載明的額定使用電壓，再插上
電源線插頭，同時做好接地工作。

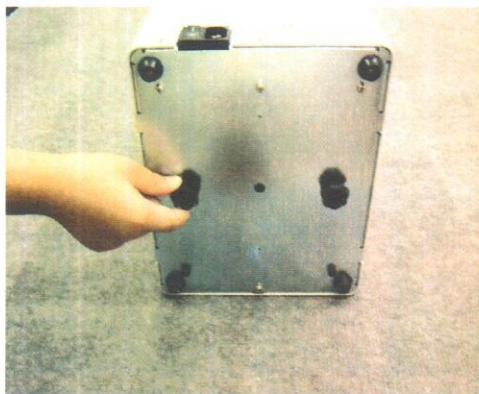

圖示一

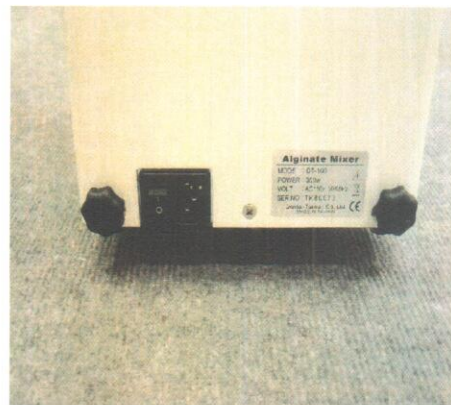

圖示二


操作面板功能說明及設定方法



- 1、開啟機體背面主電源開關 (待機)
此時操控面板 POWER 按鍵上方的 LED 亮燈
- 2、POWER 按鍵 (進入使用操作狀態)
操控面板 POWER 按鍵，按一下 (再按一下即關閉)
此時操控面板上的 時間顯示器亮啟
- 3、UP 按鍵 和 DOWN 按鍵 (操作模式的時間設定)
設定不同 MODE 上的使用時間
方法：
按 MODE/SET 按鍵，選定任一個 MODE， LED 指示燈亮啟 (共有三個，皆可由 1 秒 至 99 秒 自行設定。
例：
選定 LED1，按一下 UP 或 DOWN 按鍵，時間顯示器上數字開始閃爍後再按 UP 或 DOWN 按鍵，每按一下跳一秒(可按住不放，超過一秒後可快速選定所需時間)，當選定所需時間後，再按一下 MODE/SET 按鈕，完成設定。
LED2 和 LED3，可依上例個別設定。
- 4、MODE/SET 按鍵 (操作時間模式選擇)
機器本身提供三種不同的操作時間。
每按一下 MODE/SET 按鈕，LED 亮燈會由 LED1 至 LED3 間依序循環。
出廠值設定為: 12 秒 15 秒 06 秒
- 5、START/STOP
啟用與停止
機器內必須確實置入所要攪拌之專用器皿與內容物
蓋住上蓋後，選取所需的時間(MODE)後，按 START/STOP 按鍵，此時上蓋自動上鎖(使用中，若需臨時停止可再按 START/STOP 按鈕一下)，時間倒數完成停滯 3 秒後攪拌機上蓋才可開啟，結束單次使用。

使用方法：

1. 依照印模粉製造商所制訂的正確混水比例，將印模粉和適量的水放入攪拌碗內。(圖示三)
2. 依攪拌碗上蓋標示方向 將蓋子蓋緊。(圖示四)

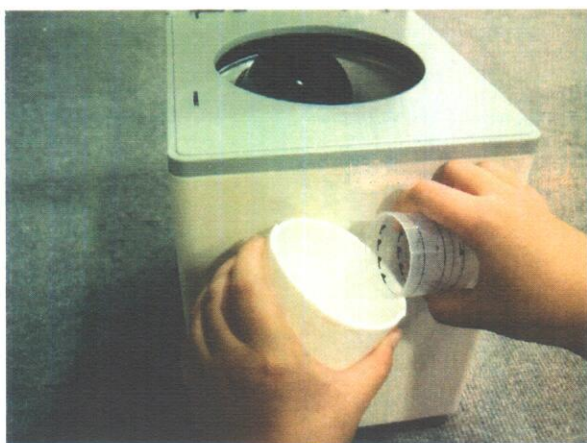


圖示三




圖示四

3. 掀開攪拌機上蓋
將裝有印模粉的攪拌碗放置在攪拌機內槽裡。(圖示五)
4. 蓋妥攪拌機上蓋後 按一下控制面板上的 **START/STOP** 鍵 開始進行印模粉攪拌。如需中途停止，則再按一次即可。(圖示六)
本設備經過精準校正，1~3 粉匙皆可使用 **MODE 1** (12 秒) 進行攪拌，不需再做任何時間調整，平穩迅速，提高攪拌機使用效率。

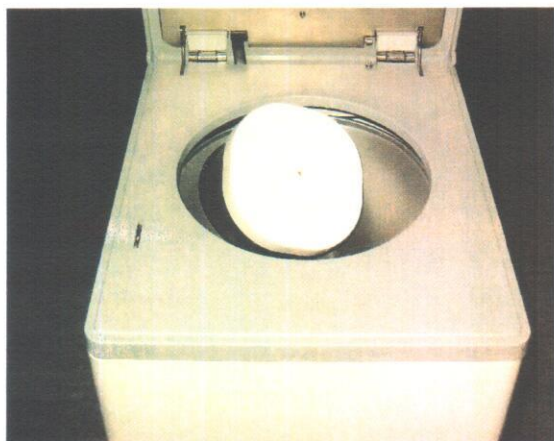


圖示五

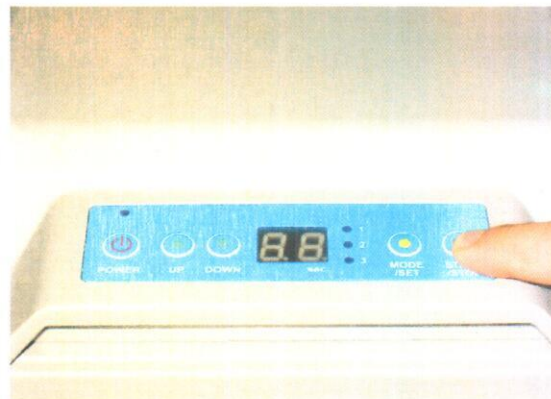

圖示六

5. 攪拌機發出 Be..聲響、且停機後，將機器上蓋打開並取出攪拌碗，再使用拌刀取出攪拌完成的印模材料。(圖示七)

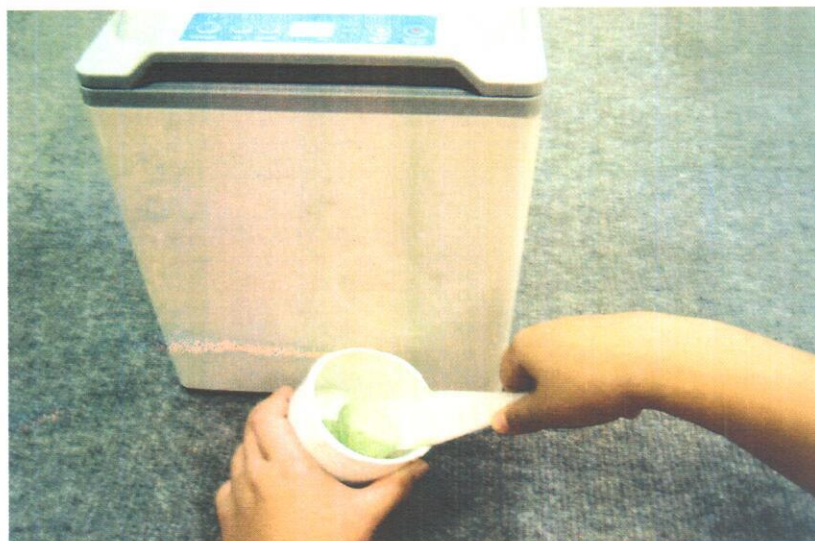

設備規格

產品名稱	藻酸鹽印模粉攪拌機 Alginate mixer
型號	DT-100
電壓/頻率	AC110V / AC230V (50/60Hz)
功率	最大 350VA
攪拌時間	1 秒~99 秒 可自行設定
外觀尺寸	高 285mm 寬 205mm 深 250mm
重量	18kg